


microlet.
Farebné lancety
• Ace de injecare colorate
• Цветни ланцети

• Jednotlivé a
různé
• Istare
• Istare
• Istare
• Istare
• Istare
• Istare
• Istare
• Istare
• Istare

25
Subjekt
lancety
Ace de
injecare
colorate
• Istare
• Istare
• Istare
• Istare
• Istare
• Istare
• Istare
• Istare
• Istare

Pokyny: / Instrucțiuni: / Инструкции:
Pozrite si pokyny dodané k vášmu odberovému zariadeniu na vykonanie merania z brúska prsta a ďalšie informácie o bezpečnosti a používaní. • Consultati instrucțiunile furnizate împreună cu dispozitivul de injecare pentru a efectua testarea din vârful degetului și pentru informații suplimentare privind siguranța și performanța. • Визте инструкциите, предоставени с Вашето устройство за убеждение, за да извършите теста от върха на пръста и за допълнителна информация за безопасност и употреба.

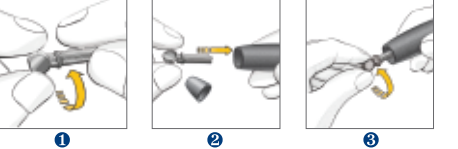

Ланцетът е стерил, като за повишената сигурност е използвана индивидуална опаковка.
• Ако не използвате ланцет веднага след изваждането му от опаковката, той трябва да се съхранява в оригиналната опаковка.
• Ако ланцетът е използван, той не трябва да се използва повторно.
• Ланцетът е предназначен за еднократна употреба. Не използвайте при повторно или повторно отстраняване. Използвайте внимателно и строго според указанията.

Wyrobiony w Polsce. • Fabricat în Polonia.
• Произведено в Полша.
6544R 90011261 Rev. 03/23

microlet.
Farebné lancety
• Ace de injecare colorate
• Цветни ланцети

Účel použitia: Lanceta Microlet® je jednorázová sterilná pomôcka určená na odber vzoriek kapilárnej krvi u dospievajúceho dieťa na účely sledovania hladiny glukózy. Táto lanceta nie je určená na použitie u povrchových. • **Scopul utilizării:** Acul de injecare Microlet® este un dispozitiv steril, destinat recoltării unei probe de sânge capilar de la un adult sau copil pentru monitorizarea glicemiei. Acul de injecare nu este destinat utilizării neintelectuale. • **Предназначение:** Ланцетът Microlet® е стерилно устройство за еднократна употреба, предназначено за вземане на капиларна кръвна проба от възрастен или дете за проследяване на глюкозата. Ланцетът не е предназначен за употреба при новородени. **VÝSTRAHA:** Uchovávať mimo dosahu detí. Toto balenie obsahuje malé časti, ktoré by mohli spôsobiť udusenie pri náhodnom prehĺtnutí. • **AVERTISMENT:** A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest ambalaj conține piese mici care pot provoca sufocare dacă sunt înghițite accidental. • **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Този опаковка съдържа малки части, които могат да причинят задушаване при инцидентно поглъщане.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care a Microlet sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care și Microlet sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care и Microlet са търговски марки или регистрирани търговски марки на Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Ak počas používania tohto zariadenia alebo v dôsledku jeho používania dôjde k vážnemu incidentu, naháňajte to výrobcovi a/alebo jeho autorizovanému zástupcovi a príslušnému štátnemu orgánu. • În cazul în care apare un incident grav în timpul utilizării acestui dispozitiv sau cu utilizare a utilitatii sale, raportați acest lucru producătorului și/sau reprezentanților săi autorizați și autorității din țara voastră. • Ако е възникнал сериозен инцидент по време на използването на това изделие или в резултат на използването му, моля, докладвайте го на производителя или негов упълномощен представител и на Вашия национален орган.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

EC REACH Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy

CE 2797

5 016003 654404

© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všetky práva vyhradené. • Toate drepturile rezervate. • Всички права запазени.

STERILE

Dovádza a distribuuje:
Bio G, spol. s r.o.
Břicháčkova 12092
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 4552 6381
E-Mail: biog@biog.sk
www.biog.sk

Importat și distribuit de:
DIRECT PHARMA LOGISTICS SRL
Parulimilor, 66, Bucuresti nr. 162
Biroul nr. 2, cod postal 077145
Jud. Ilfov, Romania
Tel.: +40 31 101 9500
diabet@directpharma.ro

Внесен и разпространяван от:
ФЪОНИКС Старм ЕООД
ул. Околарьстена път 139А
София 1700
България
Тел.: +359 2 9658 100

www.diabetes.ascensia.com
REF 80937491

ASCENSIA
Diabetes Care