



Contour[®] plus **ONE**»

Sistem de monitorizare
a glicemiei

Cum se descarcă
și se instalează **aplicația**
CONTOUR®DIABETES



Întotdeauna consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte
de a vă modifica tratamentul, dieta, sau activitatea fizică.




Contour
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

1.

Descărcarea aplicației

Pe iPhone, sau iPad
mergeți la App Store.

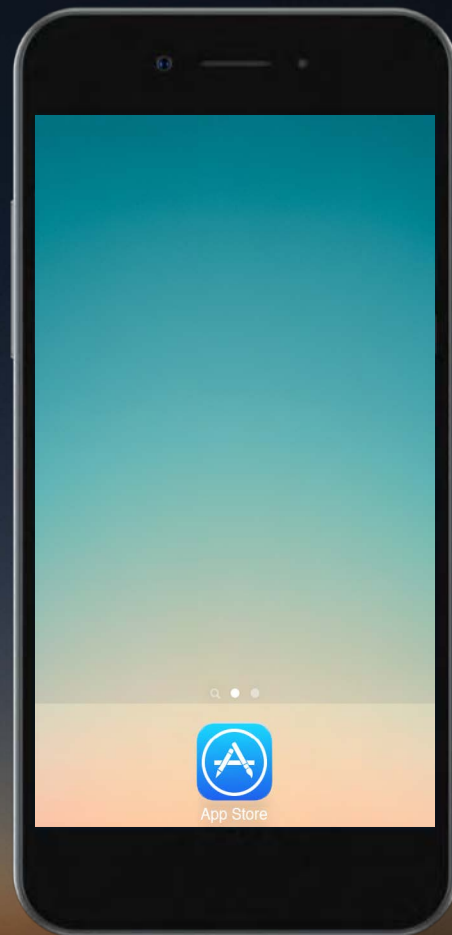


Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

1.

Descărcarea aplicației

Pe iPhone, sau iPad
mergeți la App Store.

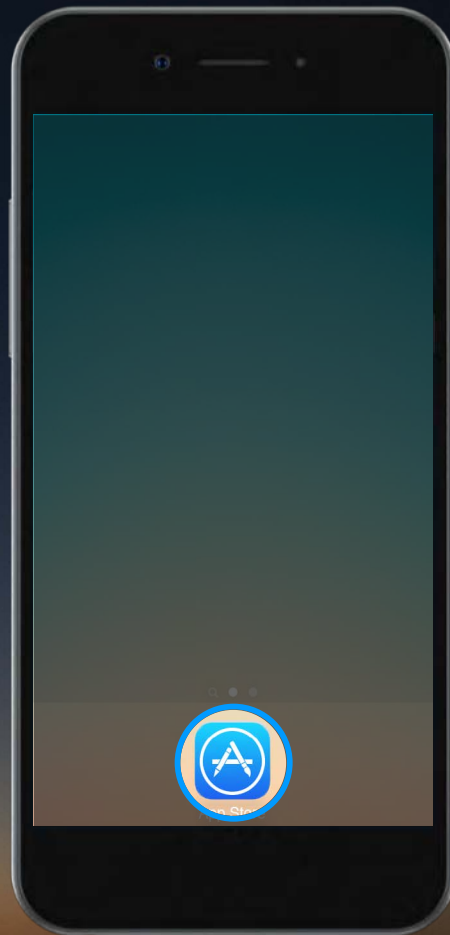


Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

2.

Descărcarea aplicației

Căutați aplicația
CONTOUR DIABETES.

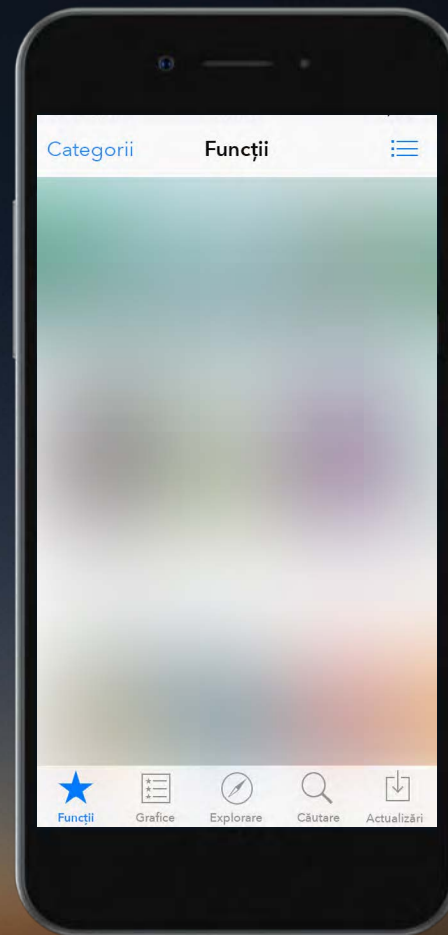


Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

2.

Descărcarea aplicației

Căutați aplicația
CONTOUR DIABETES.

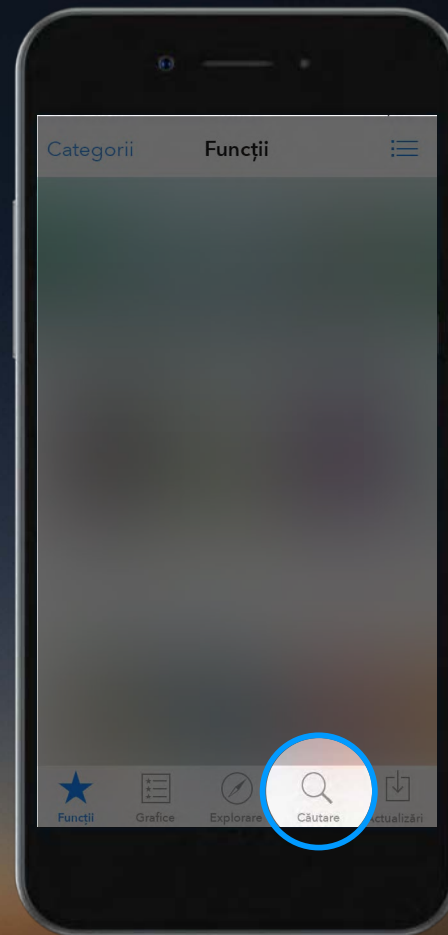


Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

2.

Descărcarea aplicației

Căutați aplicația
CONTOUR DIABETES.

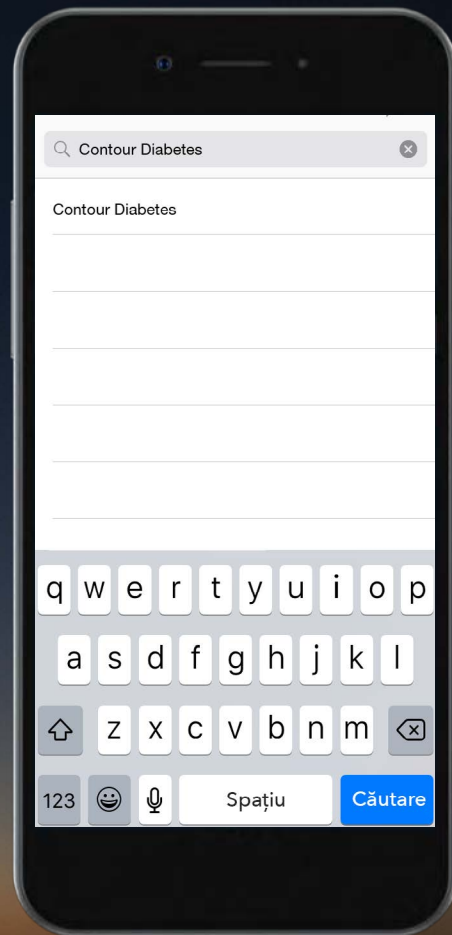


Contour
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

2.

Descărcarea aplicației

Căutați aplicația
CONTOUR DIABETES.

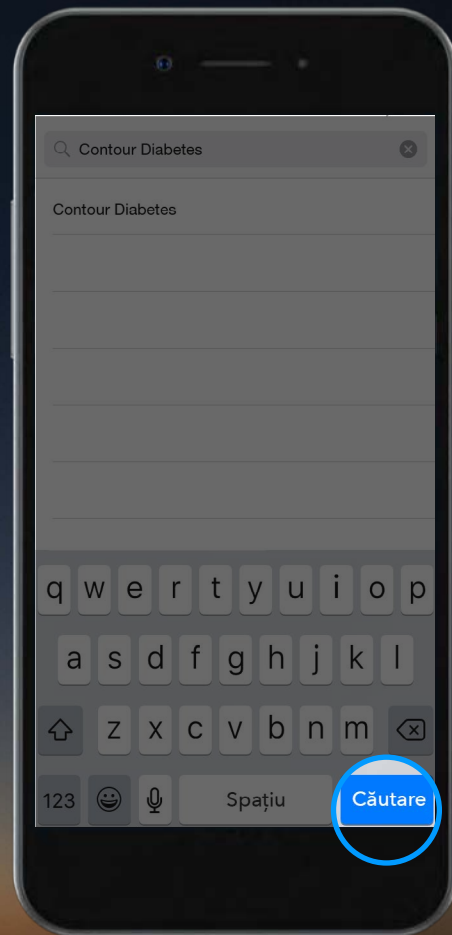


Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

3.

Descărcarea aplicației

Selectați opțiunea 'OBȚINE' și apoi 'INSTALARE' pentru a iniția instalarea aplicației **CONTOUR® DIABETES**.

Introduceți parola dumneavoastră când vi se cere.

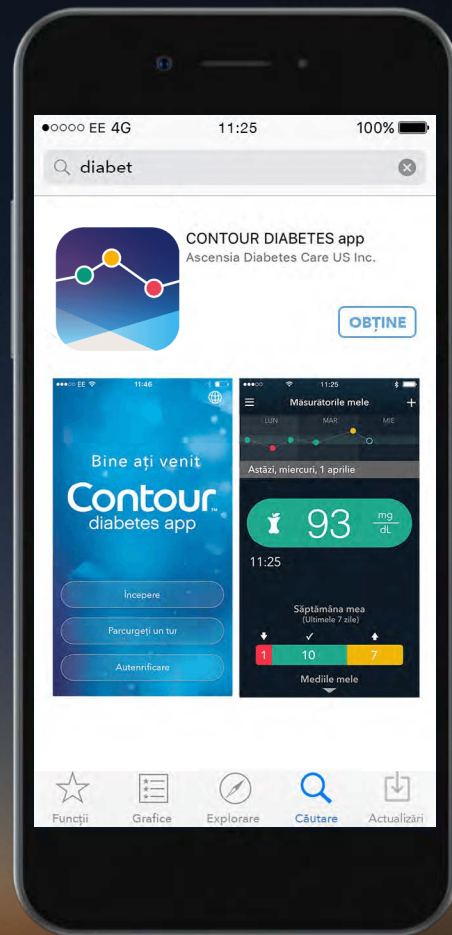


Contour®
plus ONE™
Sistem de monitorizare
a glicemiei

3.

Descărcarea aplicației

Selectați opțiunea 'OBȚINE' și apoi 'INSTALARE' pentru a iniția instalarea aplicației **CONTOUR®DIABETES**.

Introduceți parola dumneavoastră când vi se cere.

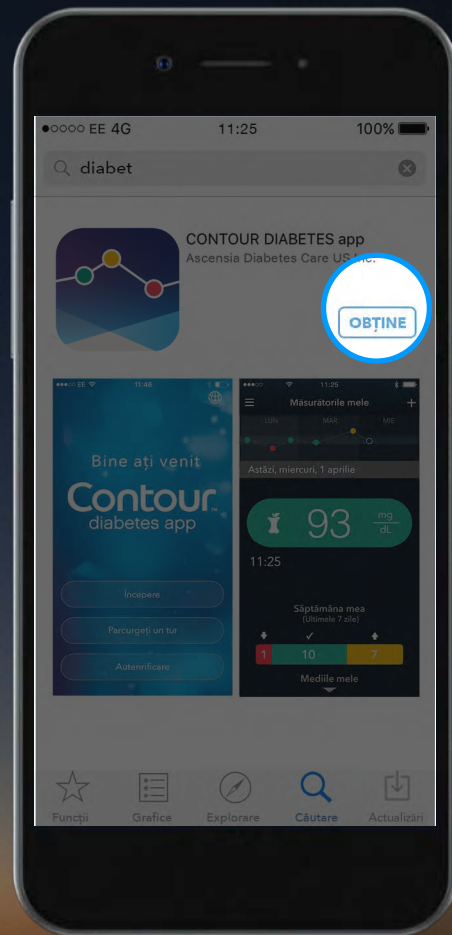


Contour®
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

4.

Instalarea aplicației

Aplicația **CONTOUR®DIABETES**
va începe să se instaleze

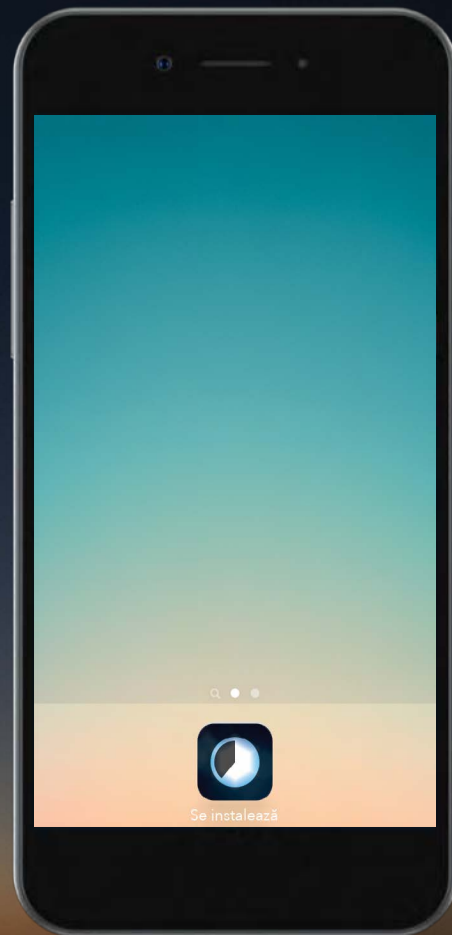


Contour
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

5.

Instalarea aplicației

Aplicația **CONTOUR®DIABETES** este acum instalată.

Acum sunteți gata de a configura aplicația **CONTOUR®DIABETES**.

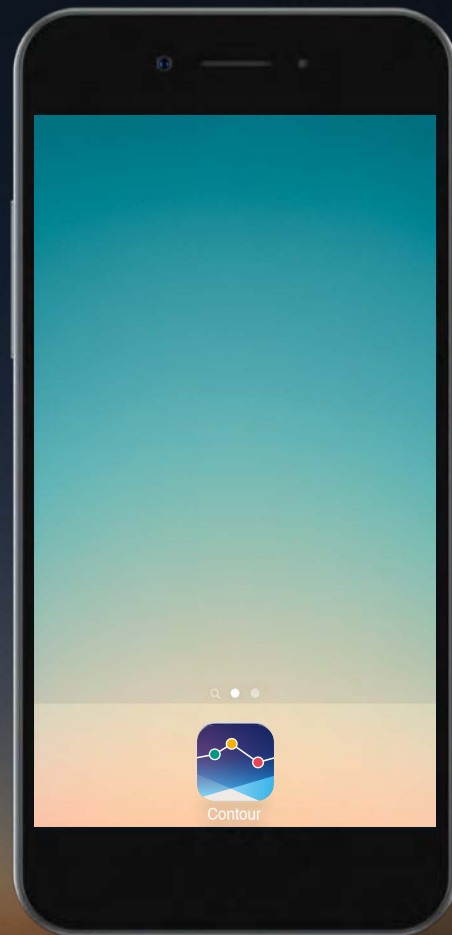


Contour
plus ONE»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

5.

Instalarea aplicației

Aplicația **CONTOUR®DIABETES** este acum instalată.

Acum sunteți gata de a configura aplicația **CONTOUR®DIABETES**.

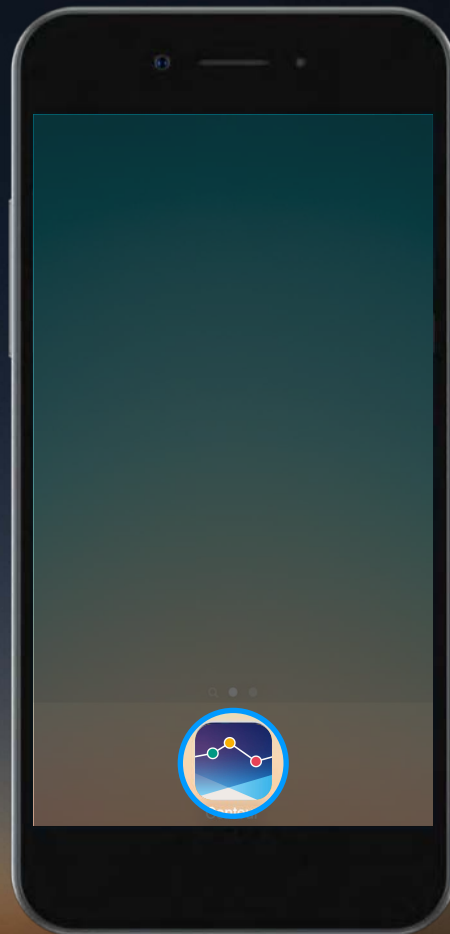

Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem de monitorizare
a glicemiei


Dacă aveți întrebări legate de glucometrul inteligent **CONTOUR®PLUS ONE**, sau de aplicația **CONTOUR®DIABETES**, discutați cu medicul dumneavoastră și consultați ghidul utilizatorului.

Pentru mai multe informații și pentru a afla dacă aceste produse sunt disponibile în țara dumneavoastră vizitați diabetes.ascensia.com



Întotdeauna consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte de a vă modifica tratamentul, dieta, sau activitatea fizică.

Optați pentru aplicație

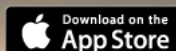

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este marca de servicii a Apple Inc. Marca cuvântului și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., și orice utilizare a unor astfel de mărci se face în baza unei licențe. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc. Ascensia, sigla Ascensia Diabetes Care și CONTOUR sunt mărci comerciale ale Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Data pregătirii: Februarie 2018. Cod: G.DC.12.2017.52587

© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG



Contour®
plus ONE™
Sistem de monitorizare
a glicemiei

diabetes.ascensia.com

