

The logo for Contour Plus ONE is centered on the page. 'Contour' is in white, 'plus' is in white, and 'ONE' is in a bold teal color with a double quote symbol to its right. Below the main text, the Romanian phrase 'Sistem de monitorizare a glicemiei' is written in a smaller white font.

Contour[®] plus ONE»

Sistem de monitorizare
a glicemiei

Vizualizați tipare ale glicemiei cu aplicația **CONTOUR®DIABETES**




Întotdeauna consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte
de a vă modifica tratamentul, dieta, sau activitatea fizică.




**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem de monitorizare
a glicemiei

Funcția **Tiparele mele** identifică tipare și tendințe specifice ale măsurătorilor glicemiei și vă notifică anumite cauze posibile.

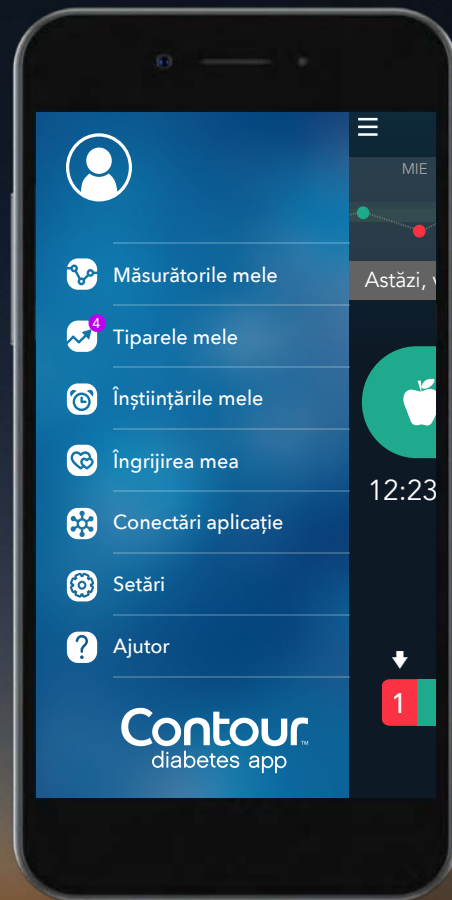

Contour[®]
plus **ONE**
Sistem de monitorizare
a glicemiei


Funcția **Tiparele mele** identifică tipare și tendințe specifice ale măsurătorilor glicemiei și vă notifică anumite cauze posibile.

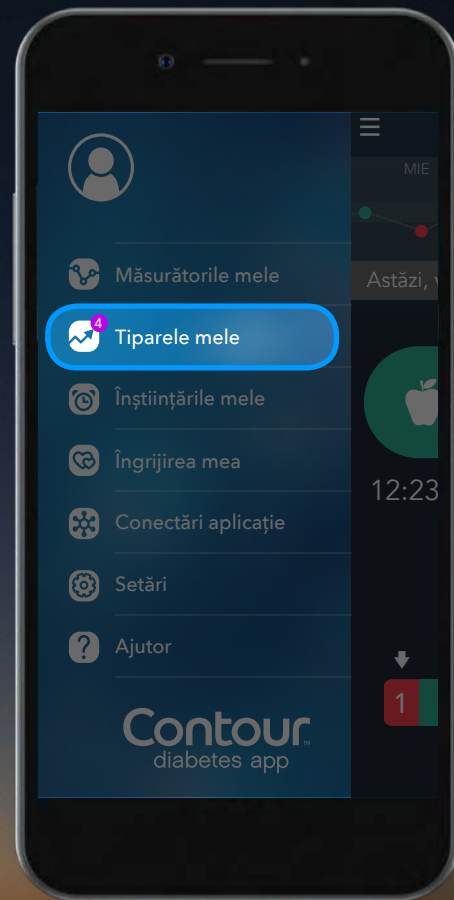

Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem de monitorizare
a glicemiei

1. Tipare


În momentul în care aplicația **CONTOUR®DIABETES** detectează un tipar veți primi mesajul **Tipar nou** detectat.

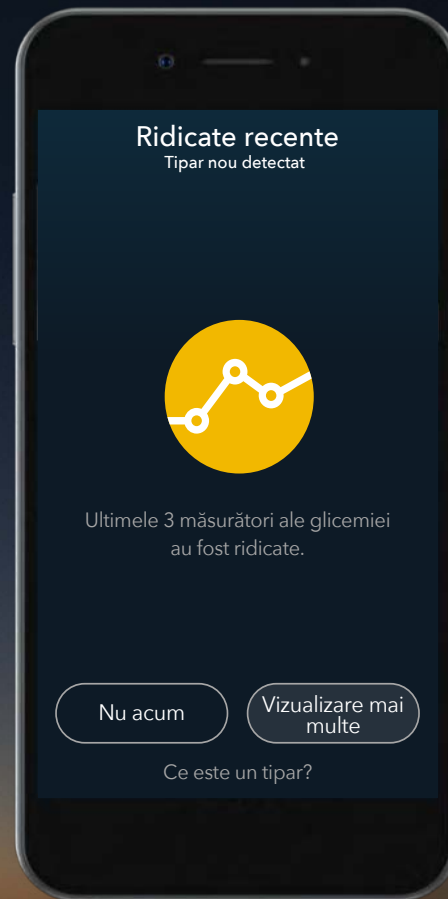

Contour
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

1. Tipare

În momentul în care aplicația **CONTOUR®DIABETES** detectează un tipar veți primi mesajul **Tipar nou** detectat.

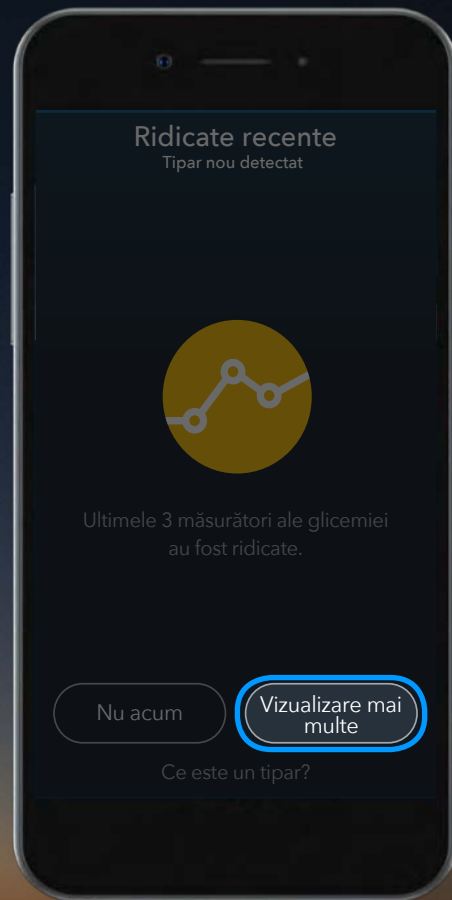

Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem de monitorizare
a glicemiei

2. Tipare

Tiparul **Ridicate recente** evidențiază că ultimele 3 măsurători ale glicemiei au fost peste intervalul țintă.



Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem de monitorizare
a glicemiei

2. Tipare


Tiparul **Ridicate recente** evidențiază că ultimele 3 măsurători ale glicemiei au fost peste intervalul țintă.

Atingeți **Aflați mai multe** pentru a citi despre cauzele posibile.



3. **Tipare**


Dacă cunoașteți cauza valorilor ridicate ale măsurătorilor glicemiei dumneavoastră, aici o puteți selecta.

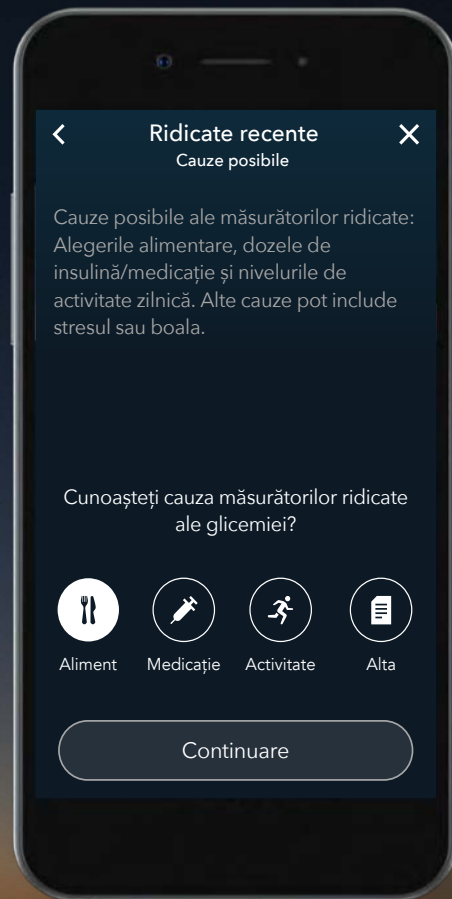

Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem de monitorizare
a glicemiei

3. **Tipare**


Dacă cunoașteți cauza valorilor ridicate ale măsurătorilor glicemiei dumneavoastră, aici o puteți selecta.

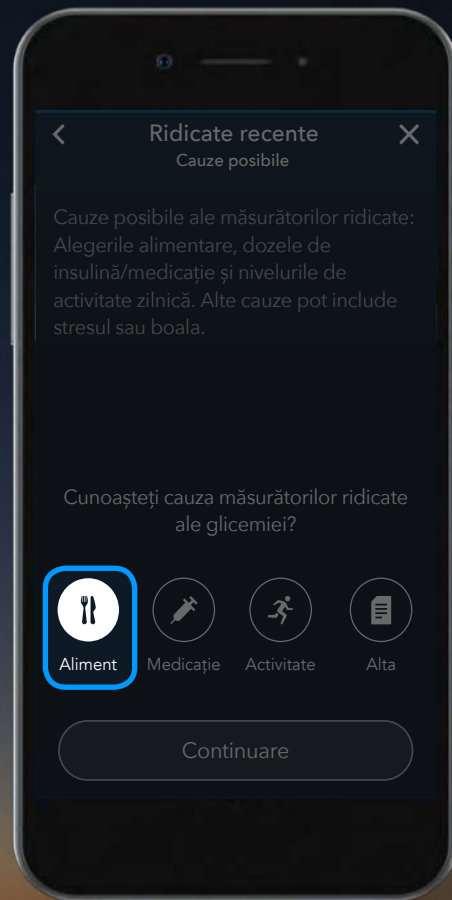

Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem de monitorizare
a glicemiei

4. Tipare

Aplicația **CONTOUR®DIABETES** oferă informații cu privire la posibile cauze ale acestui tipar.

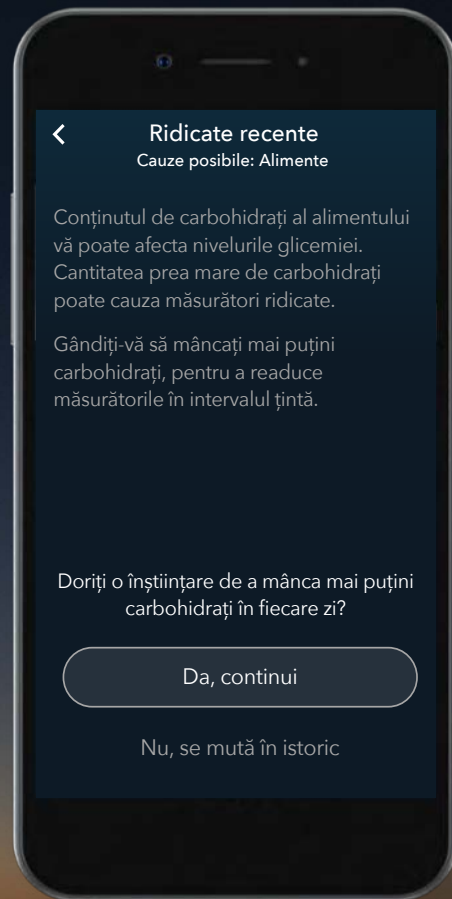


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem de monitorizare
a glicemiei

4. Tipare

Aplicația **CONTOUR®DIABETES** oferă informații cu privire la posibile cauze ale acestui tipar.


Atingeți **Da, continui** pentru a stabili o înștiințare de a mânca mai puțini carbohidrați în fiecare zi.

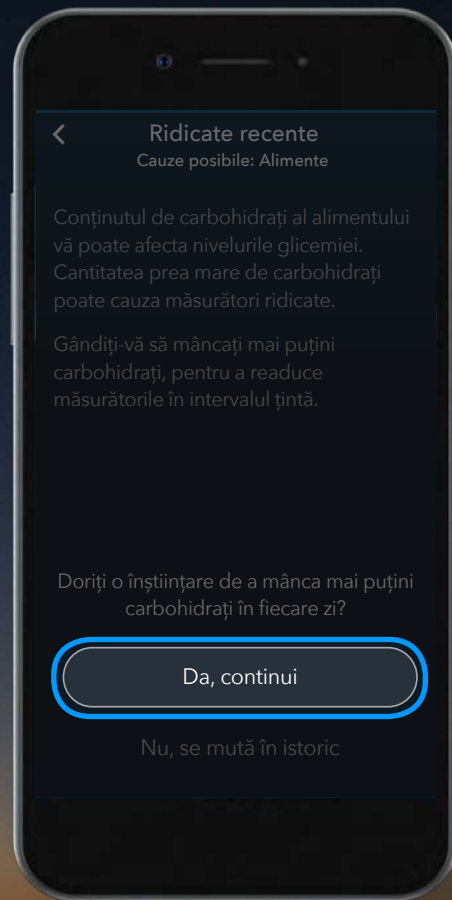

Contour®
plus ONE»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

5. Tipare

Folosiți roțița pentru a alege ora la care să primiți înștiințarea de a mânca mai puțini carbohidrați în fiecare zi.

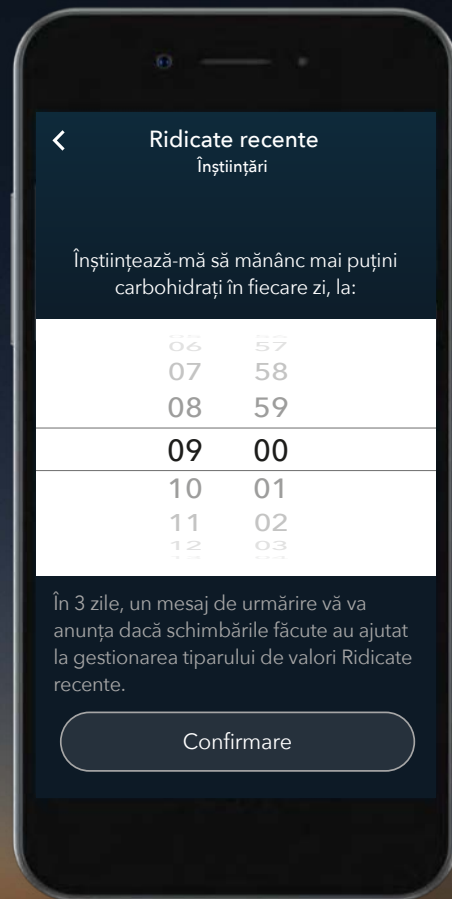


Contour[®]
plus **ONE**[»]
Sistem de monitorizare
a glicemiei

5. Tipare


Folosiți roțița pentru a alege ora la care să primiți înștiințarea de a mânca mai puțini carbohidrați în fiecare zi.

Atingeți **Confirmare** pentru a stabili ora.

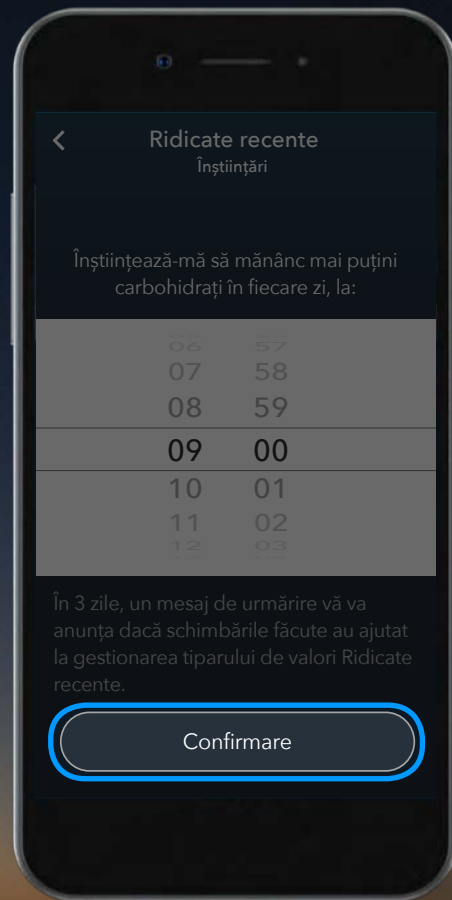

6. **Tipare**


O înștiințare va apărea la momentul ales de dumneavoastră.

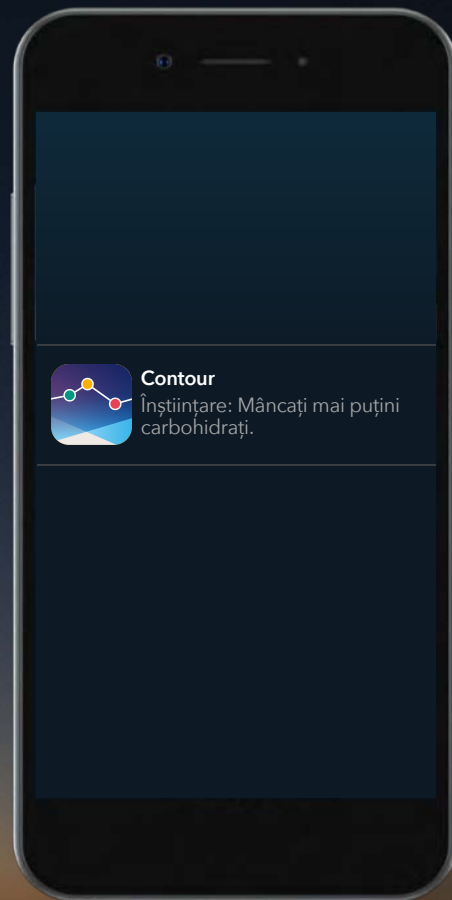

Contour
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

6. **Tipare**


O înștiințare va apărea la momentul ales de dumneavoastră.

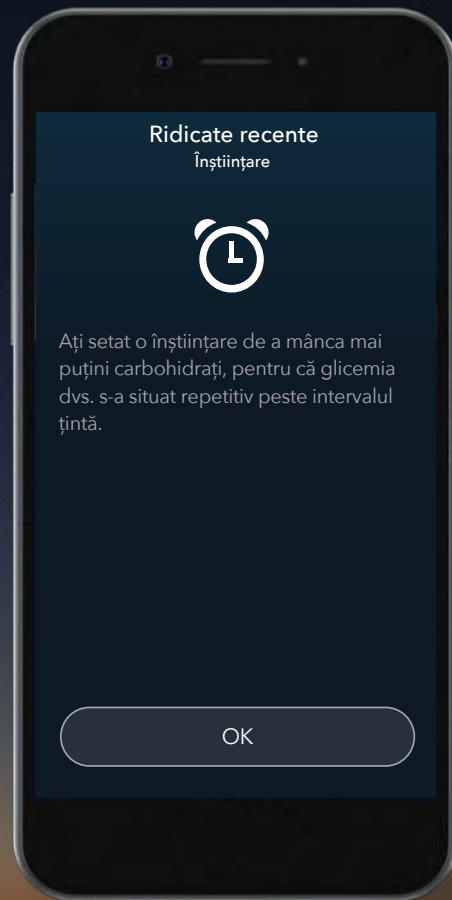

Contour
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

7. Tipare

În trei zile, un mesaj de urmărire vă va anunța dacă schimbările făcute au ajutat la îmbunătățirea tiparului **Ridicate recente**.

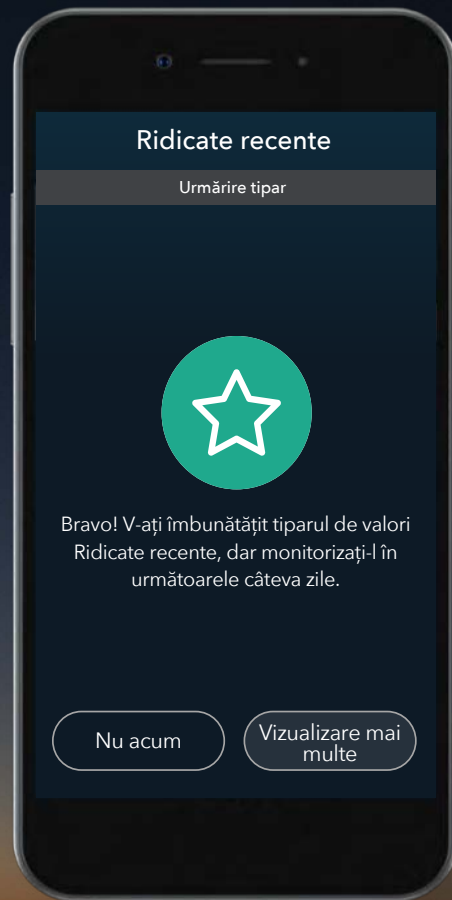


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem de monitorizare
a glicemiei

7. Tipare

În trei zile, un mesaj de urmărire vă va anunța dacă schimbările făcute au ajutat la îmbunătățirea tiparului **Ridicate recente**.

Atingeți Vizualizare mai multe pentru a afla mai mult.

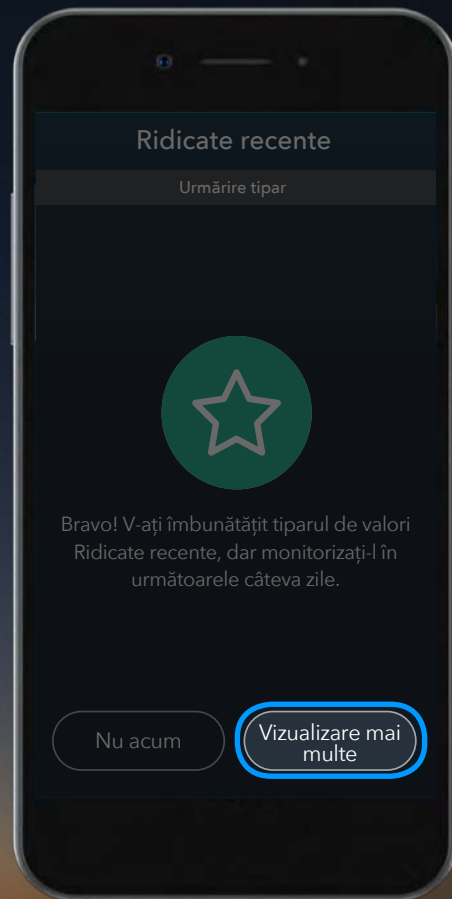

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem de monitorizare
a glicemiei


7. Tipare

Acest tipar a fost mutat în istoric și va putea fi vizualizat oricând alegând **Tiparele mele** din **Meniul principal**.



8. Tipare


Oricând puteți avea acces la tiparele dumneavoastră în **Istoric Tipar** pentru a adăuga note suplimentare cu privire la cauze posibile ale tiparului respectiv, care vă pot ajuta la o vizită ulterioară la medicul dumneavoastră.

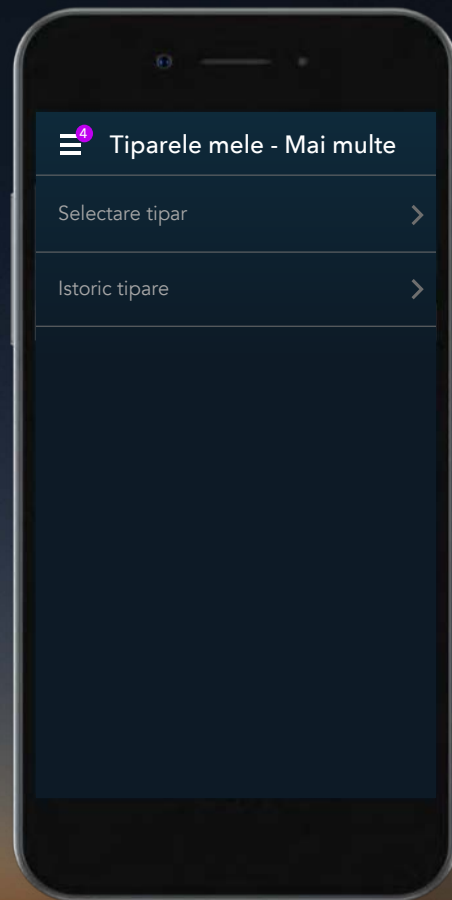

Contour[®]
plus **ONE**[»]
Sistem de monitorizare
a glicemiei

8. Tipare

Oricând puteți avea acces la tiparele dumneavoastră în **Istoric Tipar** pentru a adăuga note suplimentare cu privire la cauze posibile ale tiparului respectiv, care vă pot ajuta la o vizită ulterioară la medicul dumneavoastră.

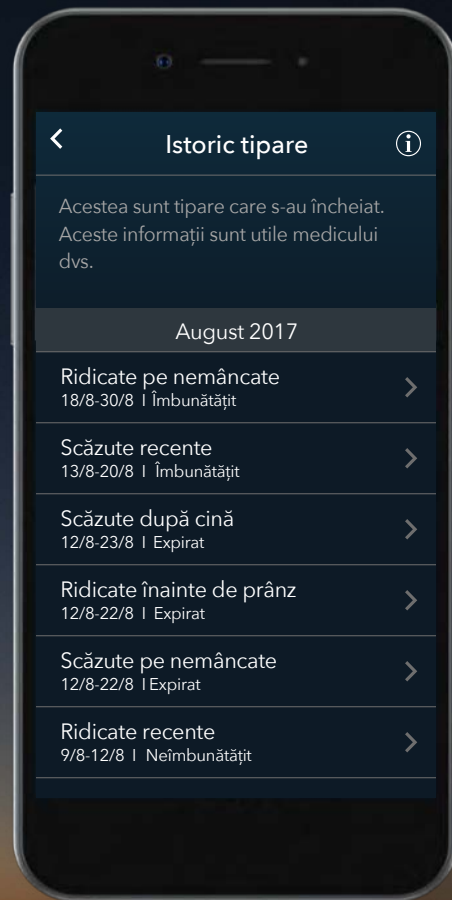


Dacă aveți întrebări legate de glucometrul inteligent **CONTOUR®PLUS ONE**, sau de aplicația **CONTOUR®DIABETES**, discutați cu medicul dumneavoastră și consultați ghidul utilizatorului.

Pentru mai multe informații și pentru a afla dacă aceste produse sunt disponibile în țara dumneavoastră vizitați diabetes.ascensia.com



Întotdeauna consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte de a vă modifica tratamentul, dieta, sau activitatea fizică.

Optați pentru aplicație

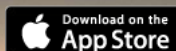

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este marca de servicii a Apple Inc. Marca cuvântului și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., și orice utilizare a unor astfel de mărci se face în baza unei licențe. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc. Ascensia, sigla Ascensia Diabetes Care și CONTOUR sunt mărci comerciale ale Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Data pregătirii: Februarie 2018. Cod: G.DC.10.2017.52579

© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG



Contour®
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

diabetes.ascensia.com

